



TECNIS SIMPLICITY™-PLAATSINGSYSTEEM

Handleiding in 3 stappen voor gebruik met **OVD** of **BSS** voor hydratatie

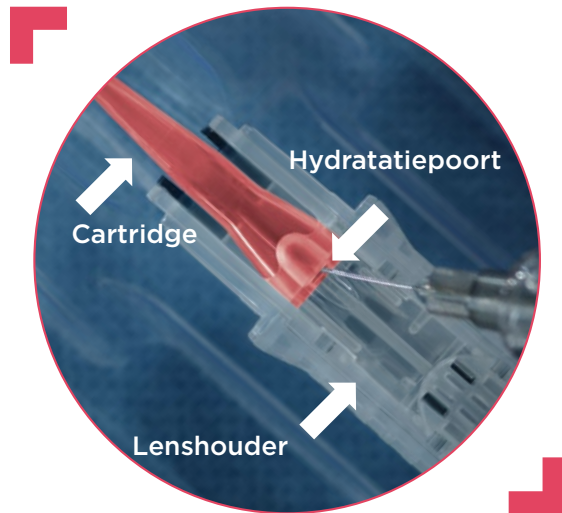

STAP 1: HYDRATEREN

- Steek de canule met **OVD** (visco-elasticum) of **BSS** (gebalanceerde zoutoplossing) volledig in de hydratiepoort.
- Vul de cartridge volledig met **OVD** of **BSS**, van de punt van de cartridge tot de hydratiepoort.
 - Vul de lenshouder niet.

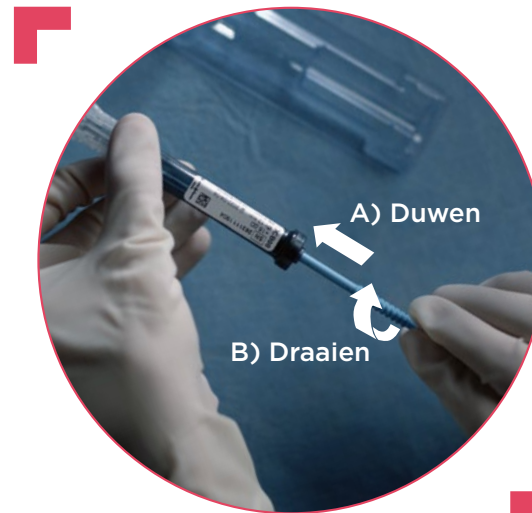

STAP 2: NAAR VOREN BRENGEN

- Doe het volgende met twee handen, in één continue beweging:
 - A)** Breng de plunger snel naar voren tot de schroefdraad in contact komt met de schacht van de inserter, en **B)** Draai de plunger een halve draai met de klok mee om de schroefdraad in de schacht te draaien.
 - Stop niet tijdens het naar voren brengen van de lens en trek de plunger ook niet terug.
 - Om de vrijgavetijd van de pootjes van de lens tot een minimum te beperken, wordt u geadviseerd om 3-10 minuten voor implantatie te prepareren. **Houd deze positie niet langer dan 10 minuten vast.**



STAP 3: INBRENGEN

- Draai de plunger met de klok mee om de lens naar voren te brengen zodat hij kan worden ingebracht.

Zie de verpakkingsbijsluiters van TECNIS Simplicity™ voor de volledige gebruiksaanwijzing.

TECNIS SIMPLICITY™
DELIVERY SYSTEM

Johnson & Johnson VISION

TECNIS Simplicity™ — De volgende generatie TECNIS® IOL-Plaatsingsystemen voor eenmalig gebruik

De veiligheid van een systeem voor eenmalig gebruik. Voor het inbrengen van de beste lenzen die op de markt verkrijgbaar zijn.



EIGENSCHAPPEN:

- Volledig voor eenmalig gebruik
- Verbeterde ergonomie¹
- Voorgeladen met speciaal geselecteerde TECNIS® 1-piece IOL's
- Volledig dioptriebereik (5D–34D)²
- Incisie grootte 2,2–2,4 mm
- 3-stapsproces van inbrengen door middel van een draai beweging

VOORDELEN:

- Soepele, gecontroleerde IOL-inbrenging¹
- Minimaal risico op besmetting²
- Keuze tussen gebruik van **BSS** of **OVD**
- Minimale kans op fouten¹

Dit is slechts een snelstartgids, die niet dient ter vervanging van de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant (verpakkingsbijsluiter) voor volledige gebruiksinstructies en veiligheidsinformatie.

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONALS IN DE GEZONDHEIDSZORG. LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING GOED DOOR. ALS U VRAGEN
HEBT, RAADPLEEG DAN ONZE SPECIALISTEN.

REFERENTIES: 1. Interne gegevens, Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2018. 2. TECNIS® monofocale IOL met TECNIS Simplicity™-
inbrengsysteem (verpakkingsbijsluiter, gebruiksaanwijzing Z311070P Rev. D, Z311246P Rev. B en Z311063P Rev. D).

TECNIS en TECNIS Simplicity zijn handelsmerken van Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
©Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2019 PP2019OTH4712

TECNIS SIMPLICITY™
DELIVERY SYSTEM

Johnson & Johnson VISION